


Новое поколение дермальных филлеров
на основе гиалуроновой кислоты

Neuramis[®]

Новое поколение
дермальных филлеров на основе ГК

Полный спектр продуктов Neuramis[®]

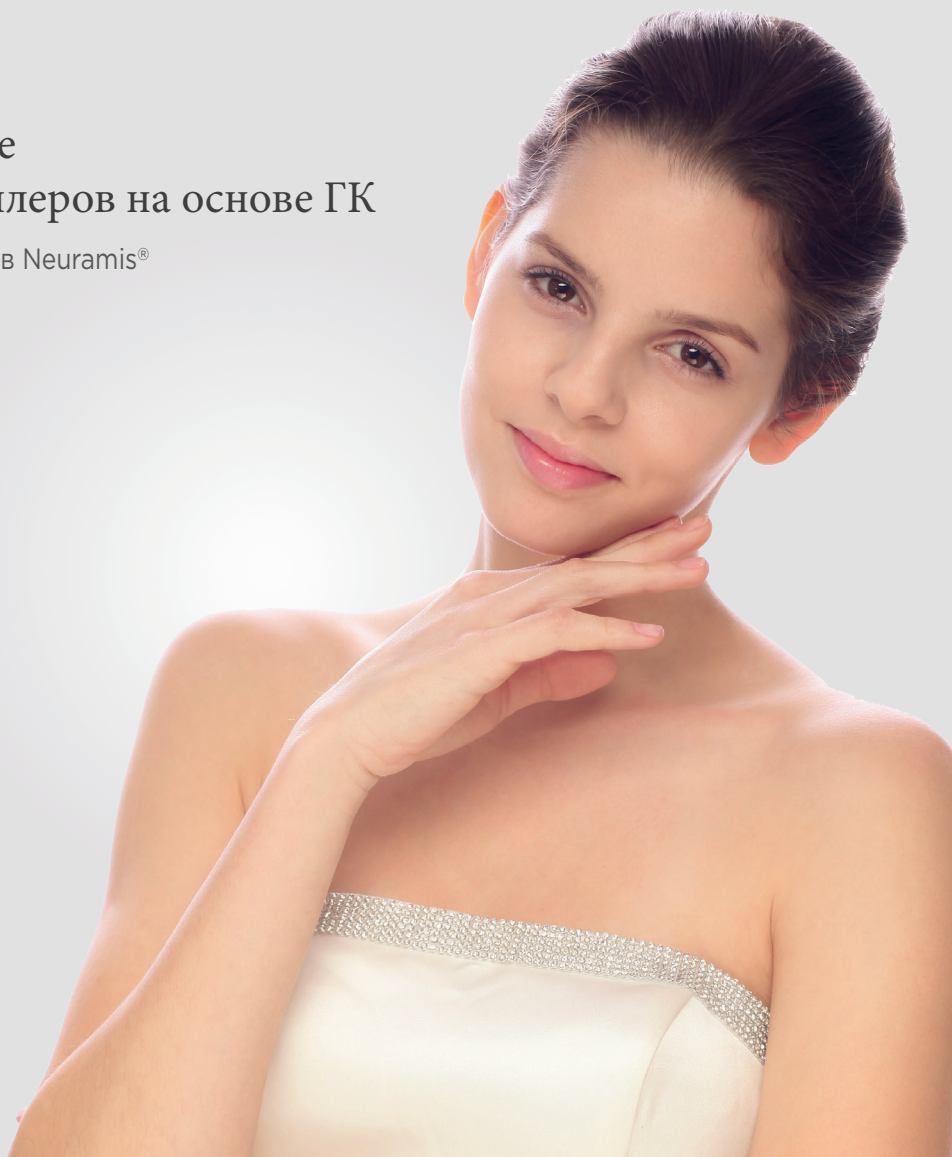

Neuramis®



Что такое Neuramis®?

Neuramis® - это НОВЫЙ пластичный дермальный филлер на основе гиалуроновой кислоты, который очень эффективен при борьбе с глубокими и средними морщинами, формировании естественного объема и омоложении кожи.


Семейство продуктов Neuramis® производится компанией Medytox, разработчиком продукта Neuronox® (ботулотоксин типа А, BoNTA) на основе разработанной технологии SHAPE™, которая характеризуется 2-этапным перекрестным сшиванием молекул гиалуроновой кислоты и усиленной очисткой компонентов.

Это позволяет свести к минимуму количество БДДЭ в несшитой форме и гарантирует следующие 3 преимущества:

Технология SHAPE гарантирует следующие 3 преимущества препаратов Neuramis®

Технология **SHAPE™** (Stabilized Hyaluronic Acid & Purification Enhancement – стабилизированная гиалуроновая кислота и усиленная очистка)

Уникальный технологический процесс производства Neuramis®, который характеризуется 2-этапным перекрестным сшиванием молекул гиалуроновой кислоты и усиленной очисткой компонентов. Технология SHAPE™ гарантирует длительный эффект и **ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ** препаратов Neuramis®.

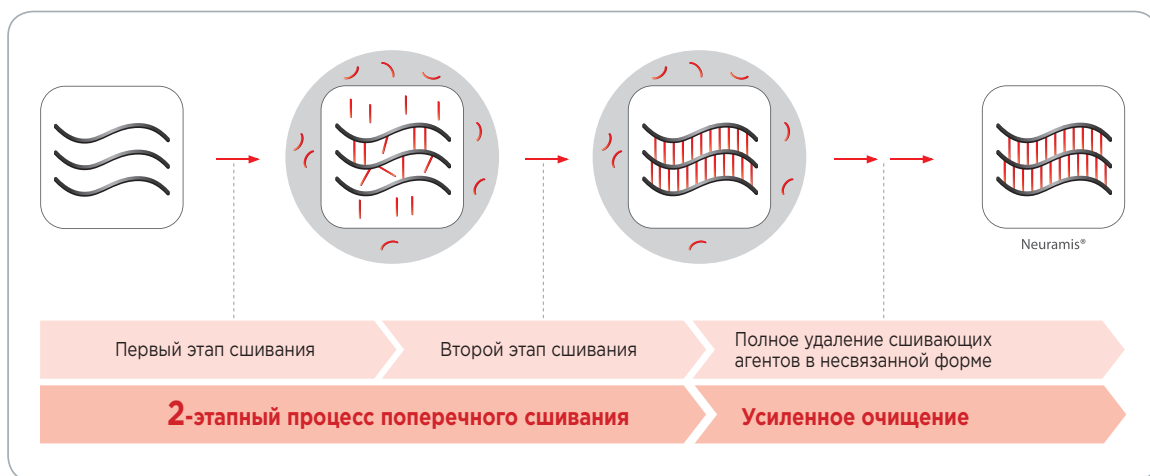

3 Преимущества препаратов Neuramis®



●● ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Благодаря своему происхождению, гиалуроновая кислота, полученная без использования животных материалов путем микробной ферментации, обеспечивает должную безопасность. Гиалуроновая кислота, на основе которой производятся препараты Neuramis, одобрена Европейским Директоратом по контролю качества лекарственных средств EDQM и Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США US FDA.

●● ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

2-этапный процесс сшивания молекул Neuramis® обеспечивает продолжительный эффект.

●● ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ

Пациенты довольны естественным результатом непосредственно после прохождения курса.















Что представляет собой гиалуроновая кислота?

Гиалуроновая кислота (ГК) – это природный полимер, который встречается в организме всех живых существ.

Дерма человека содержит высокую концентрацию гиалуроновой кислоты, которая поддерживает кожу увлажненной благодаря своим высоким влагосвязывающим свойствам. ГК – основной компонент внутриклеточного матрикса, упругого и вязкого вещества, которое позволяет тканям сохранять и поддерживать необходимый объем и защищает кожу, действуя как мягкая подстилка. Если ввести под кожу натуральный материал, он быстро рассосется. Поэтому, чтобы достичь более продолжительного эффекта, гиалуроновую кислоту делают более устойчивой путем перекрестного сшивания молекул. Такой материал позволяет достичь необходимого естественного объема кожи, ее упругости на срок от 4 до 12 месяцев.

Линейка продуктов Neuramis®

	Уровень перекрестного сшивания	Текстура геля	Концентрация	Игла	Показания
Neuramis® Meso 	Без перекрестного сшивания		20 мг/мл	30G x 3/16" (4 мм) UTW*	Гидролифтинг, эластичность, улучшение структуры кожи
Neuramis® Light Lidocaine с небольшим содержанием лидокаина 	●○○○		20 мг/мл	30G x 3/16" (4 мм) UTW*	Гидролифтинг, эластичность, улучшение структуры кожи
Neuramis® Lidocaine с лидокаином 	●●○○		20 мг/мл	30G x 1/2" (13 мм) UTW*	Заполнение поверхностных и средних морщин, увеличение объема губ
Neuramis® Deep (CE1293) для глубоких морщин 	●●●○		20 мг/мл	27G x 1/2" (13 мм)	Заполнение глубоких и средних морщин, увеличение объема губ, контурная пластика
Neuramis® Deep Lidocaine для глубоких морщин с лидокаином 	●●●○		20 мг/мл	27G x 1/2" (13 мм) UTW*	Заполнение глубоких и средних морщин, увеличение объема губ, контурная пластика
Neuramis® Volume Lidocaine для создания объема с лидокаином 	●●●●		20 мг/мл	27G x 1/2" (13 мм) UTW*	Увеличение объема тканей в области скул, подбородка, создание более выразительного контура лица

* UTW (Ultra Thin Wall, ультра тонкостенная игла): такие иглы обладают большим внутренним диаметром по сравнению с обычными. Это позволяет обеспечить оптимальный расход препарата и снизить силу, необходимую для введения.



Neuramis® Deep

●● Повышенная безопасность

01

Стабильность сырья

Используемое только отборное сырье (ГК) признано высокобезопасным и получило одобрение американскими (US FDA) и европейскими (EDQM) экспертами.

02

Усиленная очистка

Усиленная очистка с помощью технологии SHAPE позволяет свести к минимуму количество остаточного БДДЭ.


03

Пост-стерилизация


Благодаря процессу пост-стерилизации риск бактериологического заражения сведен к минимуму.

●● Естественный результат


Neuramis® Deep равномерно распределяется в тканях и позволяет сформировать **естественный объем**.

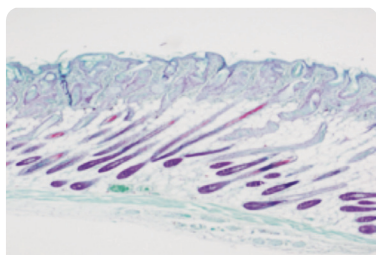

А. Контрольная группа

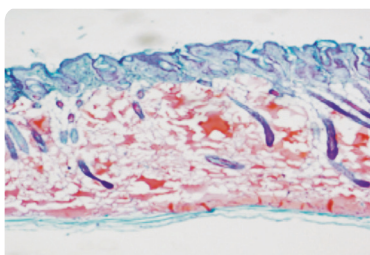

В. Neuramis® Deep

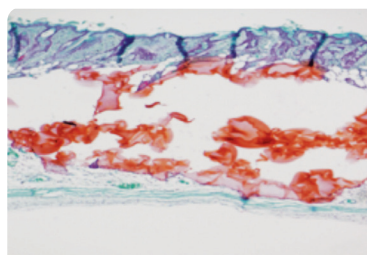

С. Бифазный филлер


- В отличие от бифазных препаратов, Neuramis® Deep обладает высокой пластичностью и формирует естественный объем, поскольку он равномерно распределяется в кожных тканях.



●● Продолжительный эффект

Neuramis® Deep, благодаря **2-этапному процессу перекрестного сшивания с использованием технологии SHAPE**, позволяет увеличить эффективность связывания молекул ГК, обеспечивая превосходный, более длительный результат.

Клинические испытания эффективности

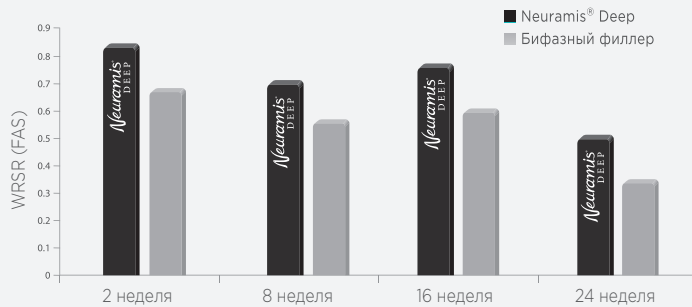

* Результат анализа по фотографиям (популяция полного анализа)


В исследовании участвовали мужчины и женщины в возрасте от 30 до 70 лет с третьей и/или четвертой степенью морщин по шкале оценки выраженности WRSR (исследование проводилось двойным-слепым методом, а также методом случайной выборки).

- Проведенный анализ по состоянию на 24 неделю выявил преимущество Neuramis Deep над Бифазным филлером в плане статистически значимых изменений выраженности морщин по шкале WRSR.

●● Высокий уровень удовлетворенности пациентов


Neuramis® Deep продемонстрировал **высокий уровень удовлетворенности пациентов** результатами проведения процедуры.

Высокий уровень удовлетворенности пациентов

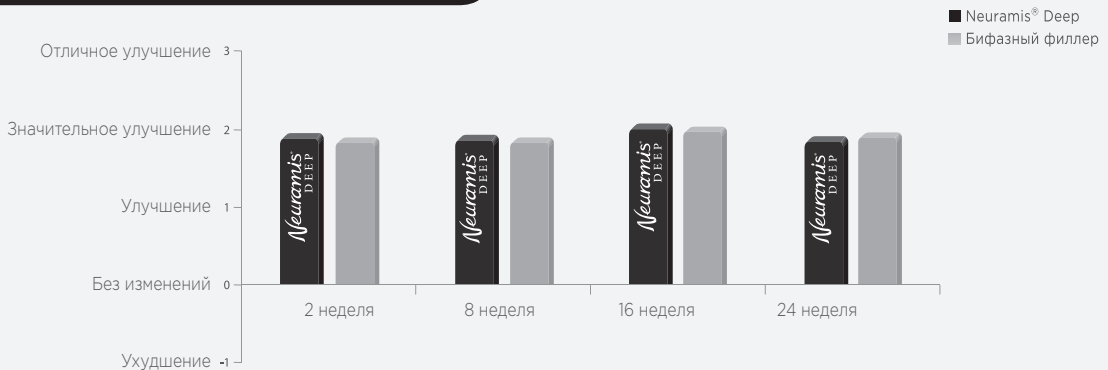

- Проведенный анализ по состоянию на 24 неделю выявил равную удовлетворенность пациентов результатами коррекции носогубной складки препаратом Neuramis® Deep и Бифазным филлером согласно средней оценке по шкале общего эстетического улучшения GAIS.

Показания

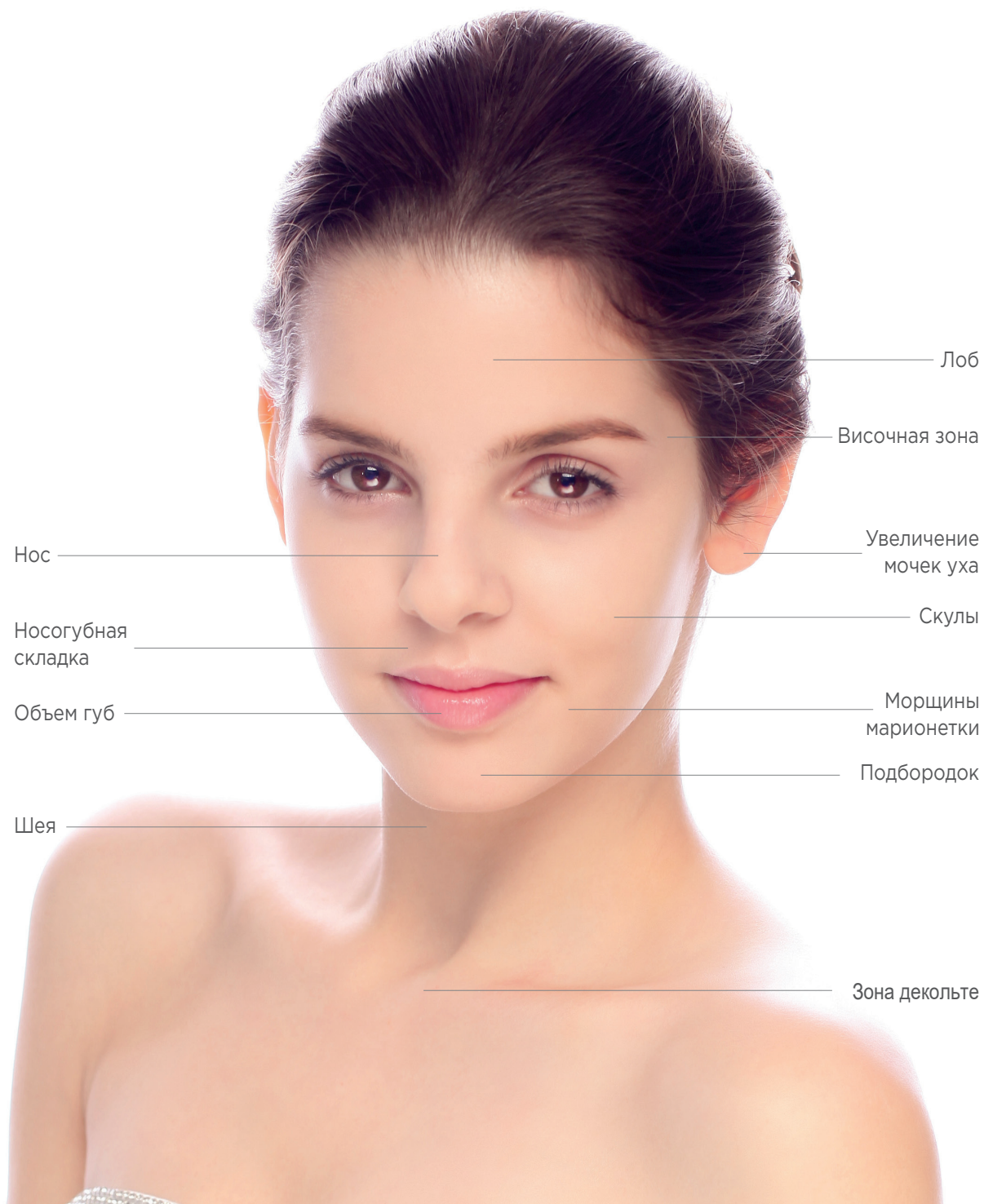

*** Продолжительность результата после проведения процедур зависит от нескольких факторов: тип кожи пациента, выраженность морщин, способ введения и вводимый объем препарата.

Результаты До и После

●● Полная коррекция лица

Женщина, 53 года: лоб, нос, носогубная складка, скулы



До



После




До



После

Женщина, 29 лет: нос, носогубная складка, скулы, подбородок

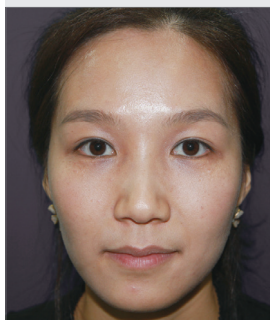

До



После



До




После

Женщина, 32 года: лоб, носогубная складка, скулы, подбородок



До

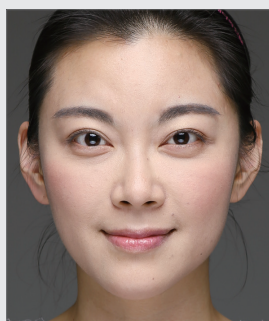

После



До



После

Результаты До и После

●● Лоб

Женщина, 57 лет



До

После

Женщина, 32 года



До

После

Женщина, 43 года



До

После

Женщина, 53 года



До

После

●● Нос

Женщина, 32 года



До

После

Женщина, 29 лет



До

После



●● Носогубная складка

Женщина, 29 лет




До



После

Женщина, 53 года

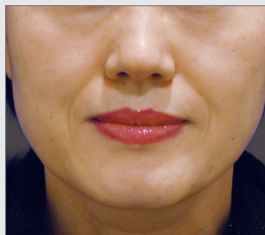

До




После

●● Подбородок

Женщина, 38 лет



До

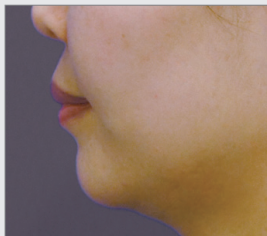

После

Женщина, 28 лет



До



После

Женщина, 32 года



До



После

Женщина, 28 лет



До



После

Neuramis®

Новое поколение дермальных филлеров
на основе гиалуроновой кислоты

Полный спектр продуктов Neuramis®



Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ
ООО «ПроМедТек»
109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, д. 2, оф. 10.06
+7 (499) 277-19-09 | info@promedtec.net | www.promedtec.net